

Акапелла™ DH

1

Инструкции по очистке и дезинфекции системы респираторной терапии


Детали устройства

Необходимо очистить две части:

- > мундштук
- > устройство asapella



Часть 1 - Разборка

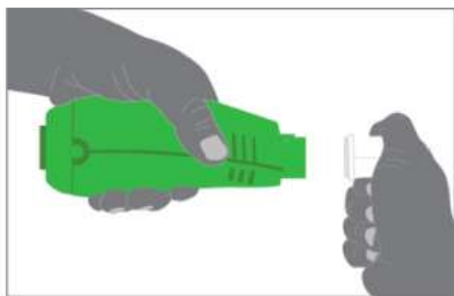

Отсоедините мундштук.

Часть 2 - Очистка

Меры предосторожности при чистке:


- > Не используйте отбеливатель
- > Не разогревайте в микроволновой печи
- > Визуально осмотрите устройство, чтобы убедиться в отсутствии загрязнений и посторонних предметов
- > Убедитесь, что все соединения безопасны
- > При необходимости ежедневно проводите очистку и дезинфекцию
- > Выбросьте устройство после 6 месяцев использования



Необходимый материал.




Вымойте руки.

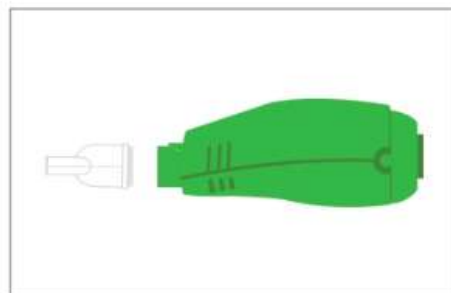

Разобрать устройство (см. часть 1).

К Протрите жидким средством для мытья посуды

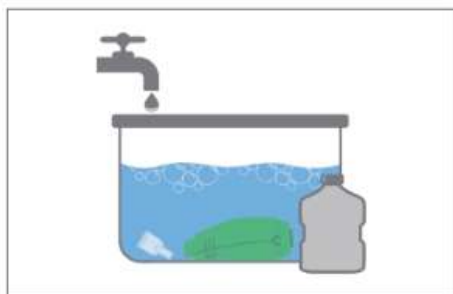


При необходимости замочите устройство и мундштук в теплой мыльной воде, чтобы удалить видимые загрязнения. Используйте жидкое средство для мытья посуды (Dawn или equivalent), смешав две (2) столовые ложки моющего средства с (4) литрами воды.




Тщательно промойте устройство кипяченой водой и дайте деталям высохнуть на воздухе. Слейте воду из устройства, установив его в обычное положение для отдыха.

Часть 3 - Дезинфекция Дезинфекция спиртом

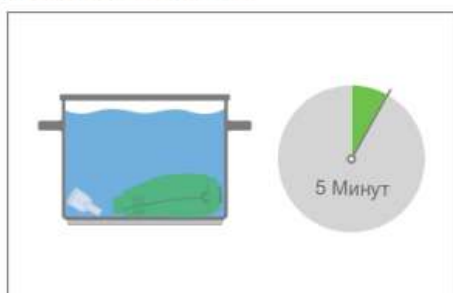


Вы можете замачивать устройство в спирте на 5 минут два раза в день. Устройство Asarella совместимо с 70%-ным изопропиловым спиртом.

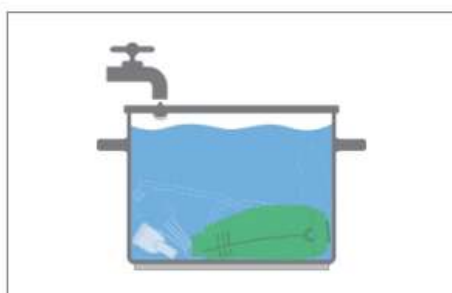


После замачивания промойте устройство кипяченой водой. Пожалуйста, дайте воде остыть перед ополаскиванием.

Дезинфекция перекисью водорода

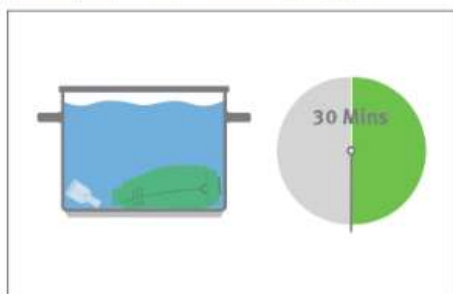


Замочите в 3%-ной перекиси водорода на 30 минут.

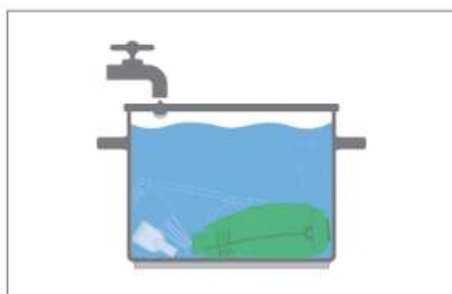

Смойте водой.

Дезинфекция глutarовым альдегидом (Cidex или эквивалент)

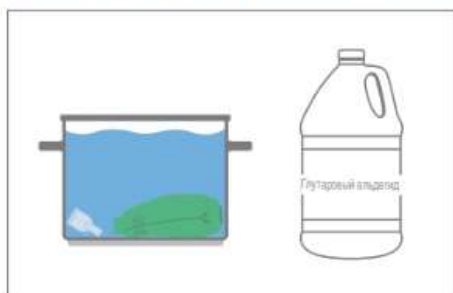

Устройство Asarella сохранит свою целостность использование холодных стерилизующих растворов, которые содержат глutarальдегид.

icumedical

человеческие связи