

ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЕР

- Назначение: устройство, используемое во время сеансов дыхательной физиотерапии, позволяет выполнять дыхательные упражнения на вдохе или выдохе.
- Используется по назначению врача, исходя из заданных целей лечения.
- Установите нужный (предписанный) клапан на устройство - вдох для упражнений на вдохе или выдох для упражнений на выдохе (для лучшей работы этого клапана не нажимайте на него сильно при установке).
- Поверните селектор с отверстиями, чтобы получить желаемый или предписанный диаметр. Лучше начинать упражнения с самого большого диаметра (отверстие № 1), а по мере продвижения диаметр отверстия уменьшать.
- Дышать только через мундштук. Регулярно выполняйте упражнения в течение 5-20 минут 2-3 раза в неделю в соответствии с предписаниями лечащего врача.
- Меры предосторожности: устройство предназначено для использования одним пациентом.
- Тщательно мойте руки перед использованием (рекомендации французского общества гигиены в больницах).
- Использование устройства разными пациентами может привести к перекрестному загрязнению и / или потере производительности.
- Если вы видите неисправность или потерю производительности, устройство необходимо удалить и заменить.
- Используйте данное устройство только в соответствии с первоначальным назначением изготовителя и при использовании устройства только по назначению и в соответствии с предписанием врача.
- Медицинское учреждение проверят выбор подходящего оборудования в соответствии с предполагаемым использованием.
- Устройство может использоваться не более 30 дней.
- Наконечник следует мыть теплой водой и обычным моющим средством при каждом использовании.
- Хранить в чистом сухом месте, вдали от света, тепла и пыли.
- Особое внимание следует уделять перемещению, обращению или использованию данного устройства в неподходящих условиях.